



Pautas de seguridad sobre las trédsesis de Ayudame3D.

- Estas trédsesis ayudarán en el día a día a personas pudiendo agarrar pequeños objetos.
- Ninguna trédsesis está pensadas para el uso de herramientas, vehículos o maquinaria pesada.
- No es posible la impresión de trédsesis para menores de 4 años.
- Informe a su médico sobre la adquisición de la trédsesis y siga sus instrucciones para un correcto uso. Desde Ayudame3D confiamos en la decisión definitiva de su médico.
- Recomendamos un uso suave sin forzar. En el momento que se note molestia, rozadura o cualquier tipo de reacción alérgica o úlceras retire la trédsesis.
- Asegúrese de que la trédsesis sea cómoda y funcione para el propósito correcto. Empiece a utilizar la trédsesis de manera progresiva.
- Recomendamos descansar tras varias horas de uso. El sudor puede desgastar la trédsesis.
- El material comienza a deformarse superados los 120°C. No exponer a estas temperaturas.
- Ayúdese de un calcetín protésico para cuidarse la piel.
- Asegúrese de no tener alergias al material de la trédsesis (PLA).
- Si la trédsesis es para un niño, este debe ser supervisado en todo momento al utilizarla, siendo responsabilidad del cuidador verificar si hay algún problema y comunicarlo.
- Es necesario que el niño conozca la trédsesis poco a poco, comenzando por 5-10 minutos los primeros días, haciendo que se sienta cómodo gradualmente. Debe dejar de usar la trédsesis en el momento que sienta molestia o dolor.

Ayúdame3D.